

セティルザイム フォーム

# Cetyl-Zyme

# Foam

Long Lasting Foam  
During & After Implant Surgery

## チェアサイドで泡!? の新発想

- 乾燥による汚れの固着を防ぎます
- チェアサイドで使えるから洗浄時の切削による感染リスクを低減
- 滅菌行程前の洗浄処理が簡素化できます
- インプラントなど処置に時間を要するケースに適します



対象

インプラント植立などの観血的処置に使用した  
治療・外科用器具類  
(金属類・ゴム類・プラスチック類など)

用途

血液、体液などのタンパク質汚れの乾炭固着  
防止と溶解除去

## セティルザイム フォーム

### 酵素系洗浄剤(泡タイプ)

2種類の酵素を配合した治療・外科用器具向けの泡タイプの洗浄剤です。術中あるいは術後に使用直後の器具を泡で覆うことにより、乾燥による汚れの固着を防ぐだけでなく、血液、体液などのタンパク質汚れを溶解除去します。洗浄工程の簡素化を実現し、デンタルスタッフの感染リスクを低減します。

# 泡で洗う!



24oz (709 mL)

標準価格 4,000円



NEO DENTAL CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD.



# Cetyl-Zyme Foam

## セチルザイム フォーム



### 使用方法

#### 使用前準備は必要




汚れたインスツルメントを泡で覆います



少し強めにトリガーを引くと液だけですが、キレイに泡立ちます。

#### フォームサイト

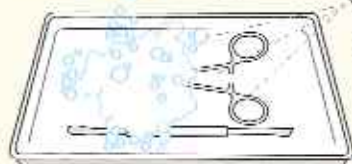

器具には触れずタンパク汚れが分解除去されるまで、泡で覆われた状態で放置して下さい



#### 洗浄・消泡エリア




水洗し、泡と分解された汚れを洗い流して下さい



放置時間は3分程度が目安です。汚れのひどい場合や、気温(液温)の低い時は適宜延長して下さい。



#### 最終処理

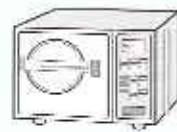

泡洗浄により、切削事故や飛沫による感染リスクは低減していますが、ゴム手袋、保護メガネも必要な防護策を熟して下さい。\*

滅菌等必要な最終処理を行います

### Dual Enzymatic Detergent Protease-Amylase

\*セチルザイムによる泡洗浄は感染リスクを低減しますが、消毒薬での最終処理は必ず行ってください。

#### 比較試験

洗浄までの時間経過により乾燥してしまった血液を流水で洗浄



術後速やかにセチルザイムの泡を吹き付け放置後流水で洗浄



#### 仕様・注意

- 容量：24 oz. (709 mL)
- 組成：プロテアーゼ・アミラーゼ・界面活性剤
- 液性：中性・無リン
- 注意：
  - ・塗装面等は目立たない部分でシミ、変色がないことを確認してから使用すること。
  - ・30℃を超えない場所で保管すること。
  - ・目に入った場合には、すぐに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
  - ・万一飲み込んだ場合には、多量の水又は牛乳を飲ませ、無理に吐かせないで医師の診断を受けさせること。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号  
Tel. (03) 3400-3768 (代) | ex. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768