

# TASK

DENTAL INSTRUMENTS  
SINCE 1968

歯科医師にも患者様にも優しい。  
メタルクラウンリムーバーは



操作方法が非常にシンプルで、スピーディーな撤去を実現。バーでの切削範囲も僅かです。また、振動なども生じにくく、患者様の負担軽減に繋がります。


メタルクラウンリムーバー

医療機器届出番号09B2X00010000338  
一般医療機器、歯科用起子及び剥離子

CODE NO.18015

標準価格 ¥12,800

## Metal Crown Remover

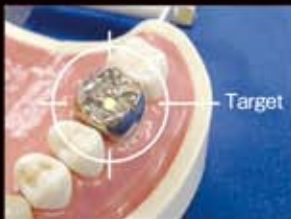

①咬合面にラウンドバーで穿孔



②プライヤー先端突起部を穿孔部位に差込み、もう一方はマージン部に引っ掛ける



③ハンドルを握りこみ撤去

### <使用方法・使用上の注意>

- 咬合面の穿孔径は1.5mm以上を推奨します。
- マージン部に引っ掛けられないときは、クラウンにスリットを入れてから使用してください。
- 撤去しにくいときは、マージン部に引っ掛ける位置を少し横にずらして使用してください。
- 無理に力を加えると、歯牙が破損する恐れがあります。

TASK DENTAL INSTRUMENTS  
SINCE 1968

<http://www.task-inc.net>

株式会社タスク 〒114-0024 東京都北区西ヶ原 2-44-10 アクト西ヶ原 4F TEL:03-3915-2413 FAX:03-3915-3182