
線鉤クラスプの屈曲

一般医療機器 届出番号 13B3X00365000911

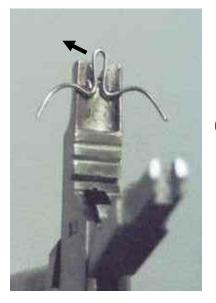

U字部を上にしてプライヤーでクラスプをしっかり把持します。 U字部の出し具合で鈎脚部の高さを自由に出来ます。



プライヤーで把持した後、上方に出たU字部 を作業台に押し当てて力を加えると鈎脚部 が曲がります。 カの入れ具合で角度を変えられます。



(有)木村鉗子製作所

東京都墨田区向島 1-18-9 TEL.FAX 03-3623-1232 E-mail <u>Kimura.kanshi@nifty.com</u> http://www.kimura-kanshi.com/