


Plaster Disk

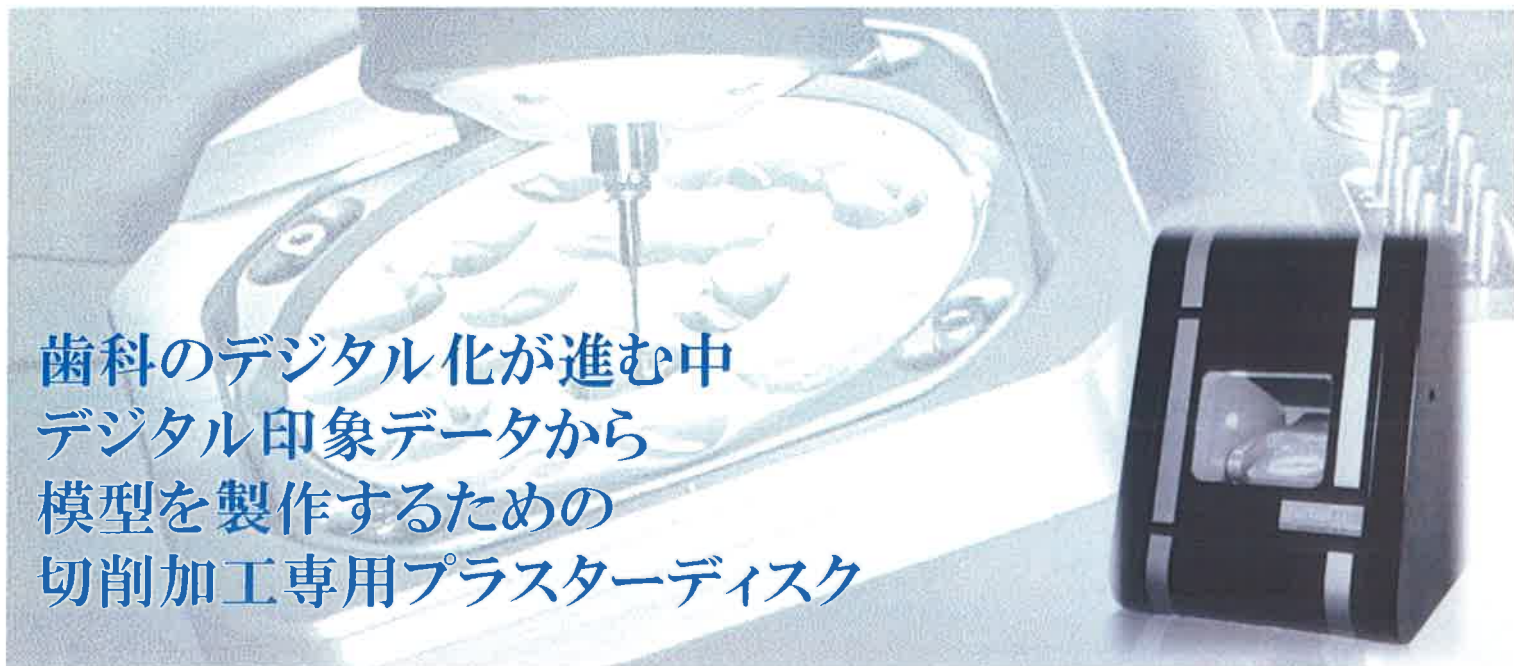

歯科のデジタル化が進む中
デジタル印象データから
模型を製作するための
切削加工専用プラスターディスク

製品仕様

- ◆直径：98mm
- ◆厚さ：20mm、25mm
- ◆入数：20mm 7枚入
25mm 6枚入
- ◆価格：15,000円



Point!

- ◆CADデータからミリングマシンにより模型を切削加工することができます
- ◆石膏ディスクを採用しているため経時変形が起きにくくなっています
- ◆独自設計により切削加工等におけるミリングツールの消耗をおさえることができます
- ◆専用硬化材を使用することにより作業模型としてご使用いただけます
- ◆裏面に製作工程をご紹介しています



*本カタログに記載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
*記載の価格は2017年8月1日現在のものです。また、価格は希望医院価格です。(消費税は含まれておりません)

製作工程



院内

口腔内スキャナー
スキャン・データ送信




ラボ内

スキャンデータ確認



模型データのデザイン
(exocad Model creator)

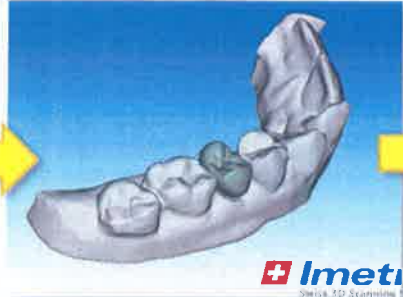

上部構造も同時デザイン



切削加工



ブルーカット



専用石膏硬化材(Base)に
全体をつける



エアブロー

専用石膏硬化材(Cure)を
筆等で全体に塗布

自然乾燥



完成

※模型データのデザインについては各デザインソフトの操作に従って下さい
※切削加工については各切削加工機の設定に従って下さい

関連製品

プasterディスク専用硬化材



— Base — — Cure —

製品仕様

- ◆ プasterディスク専用硬化材セット【Base/Cure】
- ◆ 包装: 500mℓ/各種1本
- ◆ 価格: 5,000円

- ◆ プasterディスク専用硬化材—Base—
- ◆ 使用方法: 浸漬
- ◆ 包装: 500mℓ
- ◆ 価格: 3,000円

- ◆ プasterディスク専用硬化材—Cure—
- ◆ 使用方法: 筆塗
- ◆ 包装: 500mℓ
- ◆ 価格: 3,000円



製造販売元 株式会社C・C・A・A
〒463-0046 愛知県名古屋市守山区苗代二丁目4-27
TEL 052-799-3951 / FAX 052-799-3952
E-mail info@ccaa.jp http://www.ccaa.jp/