

天



Low expansion dental stone
Leads
Laboratory work to a new dimension

L-STONE

リーストーン
低膨張硬質石膏

超硬質石膏と同等の寸法精度で硬質石膏模型を作製できます。
寒天・アルジネート印象材などでもきれいな模型面が得られます。



リーストーン



- 低膨張
CAD向き
- 滑らかな
模型面
- レモンイエロー
ブラウンイエロー
グレー

サンエス石膏株式会社
SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

地

超硬質石膏と同等の寸法精度ですので
特に CAD / CAM 冠の模型に適しています。

特長

- 1 超硬質石膏と同等の膨張率で寸法精度の高い模型を得ることができます。
- 2 寒天連合印象・アルジネート印象などできれいな模型面を得ることができます。
- 3 鮮やかなレモンイエロー、落ち着いたブラウンイエロー、陰影の見やすいグレーの3色をご用意しています。

用途

- 1 インレーの低膨張模型用
- 2 クラウンの低膨張模型用
- 3ブリッジ等の低膨張模型用

用法・用量

- 1 粉末100gに対して水24mlが標準です。操作に支障のない範囲で水量を少なくすると、より強度・硬度の高い模型が得られます。ただし膨張は大きくなります。
- 2 練和時間は真空機械練和で30秒、手練和では60秒が適切です。
- 3 印象等への注入の際、バイプレーターなどを用いると気泡の少ない模型が得られます。

物理的性質

試験項目 Test Items	測定値(注) Values determined
混水比(水/粉) Water/Powder ratio(W/P)	0.24
硬化時間(分) Setting time (min)	10
線硬化膨張(%) Linear setting expansion <2hr>	0.08
圧縮強さ<1時間後>(MPa) Compressive strength <1hr>	49

試験方法:JIS T6605による (タイプ3)

Test Method:Based on JIS T6605

(注)測定値は、弊社での代表的な値であり規格値ではありません。

色調

- 1 レモンイエロー
- 2 ブラウンイエロー
- 3 グレー

包装

3kg箱(3kgアルミ)×6/PC

SSS サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部

東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

一般医療機器 届出番号27B2X00022000049 製造販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

H300228