



DENTAL ALGINATE IMPRESSION
MATERIAL [DUST FREE]

NEW ALGISTAR

ニューアルジスター®

歯科用アルギン酸塩印象材 粉末状

口腔内で垂れにくく、硬化後に外しやすい。

使う方に、患者さんに、優しい印象材です。



ノーマル

ファスト

スロー

軽い
練り感

垂れにくい
ペースト

ツツと
しない

サンエス石膏株式会社
SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

粉末飛散が少なく、練りやすく、なめらかな仕上がりで、各種石膏と適合します。

特長

1 粉と水のなじみが早い

ニューアルジスターは水の中に沈みやすく、練和しやすくなっています。

2 軽い力で早く練りあがる

ニューアルジスターは水とのなじみが速いので、速く練りあがります。しかも練和中も手への抵抗が少なく軽い力で練和出来ますので手首への負担が軽減出来ます。

3 柔らかいペーストなのに垂れない

ニューアルジスターは粘りのあるペーストになりますので、意識的に固練りしなくても垂れにくくなっています。

4 限りなく香りが少ない

ニューアルジスターは香りを少なくしています。このため香りに敏感な患者様にも安心してお使い頂けます。

5 歯質に着きにくい

ニューアルジスターは歯質に接着しにくいので、硬化後患者様の口腔内から外しやすく、患者さんに恐怖感を抱かせません。また、簡単に外せることで変形を防ぐ工夫をしています。

6 変形が少ない

ニューアルジスターは印象に弾力性があるので、口腔内から撤去する際にアンダーカットのきつい部位でも柔軟に広がって変形を防ぐ工夫をしています。

7 自動練和機にも対応

ニューアルジスターは手練りと自動練和機の両方に対応しています。使い分けされるお客様には2種類用意する必要がなく便利です



使用方法

1 使用前に粉末をよくほぐしてから計量してください。

2 計量はニューアルジスター専用のスプーン・水量を使用してください。

3 スパチュラで約30秒手早く練和してください。機械で練和する場合は、機械メーカーの説明書に従ってください。

※硬化時間は水温に影響されますので、23℃を標準としてください。

4 印象採得。

5 印象は流水で洗浄後、必要に応じて消毒を行ってください。

6 余剰水分を取り除き、できるだけすみやかに歯科用の石膏を注入してください。すぐに注入できない場合は保湿箱に入れてください。

7 使用後の印象は医療廃棄物として廃棄してください。

操作時間の違いで3タイプ。各種ニーズにお応えできます。

	ニューアルジスター ファスト	ニューアルジスター ノーマル	ニューアルジスター スロー
トータル 操作時間	1分30秒	2分	2分30秒
色調	グリーン	ピンク	ホワイト



NEW ALGISTAR

【歯科用アルギン酸塩印象材 粉末状】

包装形態 5kg箱入(1kgアルミ袋×5)×2/PC

管理医療機器

●ニューアルジスターファスト認証番号 第219AABZX00188000

●ニューアルジスターノーマル認証番号 第219AABZX00189000

●ニューアルジスタースロー認証番号 第219AABZX00190000

製造販売元:サンエス石膏株式会社

製造販売許可番号27B2X00022



大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部
東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

検索

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ