

# Denture Pure Pro

歯科医院・技工所用義歯洗浄液

デンチャーピュア・プロ

特殊界面活性剤配合

歯石とヌメリを短時間に溶解除去。  
除菌効果にも優れた新しい義歯洗浄液です。


## デンチャーピュア・プロの特長

● 落ちにくい頑固な歯石を除去します。

● 歯石溶解力に優れ、レジン床や  
クラスプ類を傷めません。

● 義歯についたヌメリもなくなります。

● 除菌にも優れた効果を発揮します。

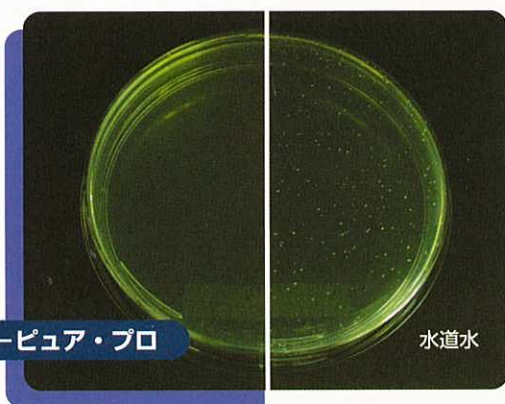

義歯の洗浄液を24時間培養



洗浄前



洗浄後

### 用途

義歯、その他補綴物（矯正用リテーナー、マウスガード、スプリントなど）の洗浄

### 使用方法

1. フタ付きのガラス容器に、義歯が完全に浸漬するように必要量を取ります。  
総義歯1個に対し100mlを目安とし、希釈せずに原液で使用します。液は毎回交換してください。
2. 超音波洗浄器で5～10分間洗浄します。機械の出力や義歯の汚れ具合により時間を調整してください。
3. 義歯を取り出し流水で充分洗浄します。表面にキズ等のある場合、清水で超音波洗浄してください。

### 使用上の注意

- ・長時間浸漬をすると、銀含有率の高い金属などは変色する場合があります。
- ・作業時は保護メガネおよび炊事用ゴム手袋を着用してください。
- ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。塩素系の製品と一緒に使うと塩素ガスが出て危険です。
- ・用途以外には使用せず、子供の手の届かないところに直射日光を避けて保管してください。

製造発売元

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-16

TEL.06(6942)7241(直)

東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-5-14 入江ビル5F

TEL.03(3279)1021(直)

<http://www.taihei-chem.co.jp>