


次亜塩素酸ナトリウムで補綴物を しっかり除菌・洗浄

- 試適後の補綴物の除菌・洗浄に
- 完成補綴物等の除菌・洗浄に

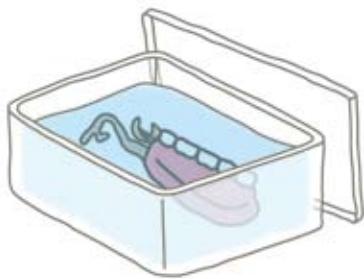

- 20倍希釈液に1時間浸漬します。(浸漬は3時間以内とし、フタ付の容器を使用してください)
- 特殊防錆剤配合で各種素材にも安心して使用できます。



ステリテクト

厚生労働省のB型肝炎感染予防のガイドラインおよび日本補綴歯科学会の感染対策指針において、次亜塩素酸ナトリウムの使用が推奨されています。



義歯洗浄はおまかせ！ 汚れに合わせて使い分ける。

着色除去には

3倍希釈で超音波洗浄します。



ステリテクト

歯石除去には

原液で超音波洗浄します。



デンチャーピュア・プロ



- ガラス製のフタ付の容器をご使用ください。
- 浸漬後は十分流水で洗浄してください。



※ステリテクトとデンチャーピュア・プロは成分上、絶対に混ぜないでください。

High Technology & Sincerity
Ⓣ 太平化学産業株式会社

大阪本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋 1-16 TEL.06(6942)7241(代)
 URL <http://www.taihei-chem.co.jp>