

**3M** Science.  
Applied to Life.™

インプリント™ 4 印象材  
ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器  
3M™ ESPE™ 圧排ペースト



**よりスピーディでスマートな印象採得!**

- 印象材の口腔内保持時間を大幅に短縮!
- 高精度と撤去のし易さを両立した、日本向けの製品を特別に開発!
- コンパクトで、折りたたみ・持ち運びができる自動練和器!

# 精度の高い印象採得を短時間で!

精密印象をもっと短時間で! 幅広い症例に使いやすく!

インプリント™ 4 印象材は、

歯科医師にも患者さんにも喜ばれる印象材を実現しました。



写真提供：東京都開業 岡口守雄先生

インプリント™ 4 印象材は、  
視認性・快適性も考慮した製品です。

鮮やかなペストカラーでマージンの視認が容易です。  
爽やかなミントの香りで患者さんの不快感を和らげます。



# 症例による使い分けが可能に

2種類のトレー材をご用意しました。



インプリント™4 印象材  
ベンタ™ソフトトレー ボディ

インプリント™4 印象材  
ライト ボディ



インプリント™4 印象材  
ベンタ™ヘビー ボディ

インプリント™4 印象材  
レギュラーボディ

## 印象撤去が容易なソフトトレー ボディ

クラウン・ブリッジ用

ショアA硬度：56

適している症例  
●単冠 ●ブリッジ


## インプラントに適したヘビー ボディ

インプラント用



ショアA硬度：71

適している症例  
●インプラント ●ロングスパンブリッジ

ソフトトレー ボディでクラウンの印象を採得

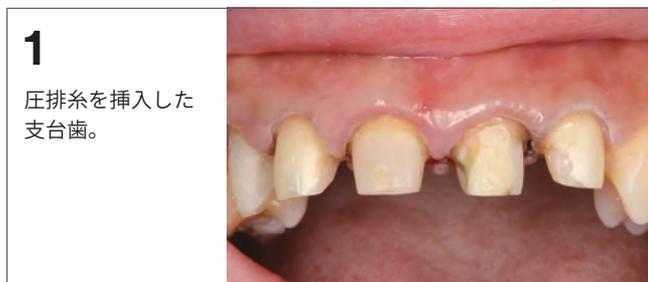

ヘビー ボディでインプラントの印象を採得

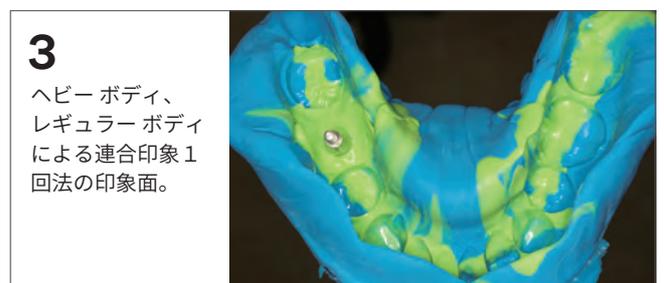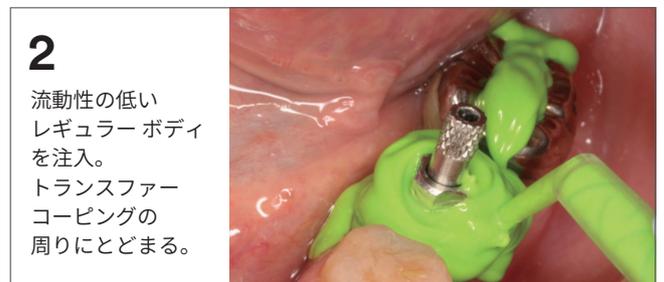

# 簡単操作で均一な練和をスピーディに

印象材を半額でご使用いただけます (1mL単価)

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器で使用する、インプリント™ 4 ペンタ™ 印象材製品は、50mLカートリッジに換算すると7.2本分の大容量。1mL当たりの価格が半額で、材料の無駄もなく経済的にご使用いただけます。気泡を巻き込まない均一な練和をスピーディに行えます。(フルアーチ印象時の練和は25秒程度)



	 インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトトレー ボディ	 インプリント™ 4 印象材 ソフトトレー ボディ
容量の比較	<b>360mL</b> (  ×7.2本分)	<b>50mL</b>
コストの比較 (円/mL)	約 <b>40円</b> (  の半額)	<b>81円</b>
フルアーチの 印象時の練和	<b>25秒程度</b> 	<b>40秒程度</b> ギャラン™ (ガンタイプ) の場合

3M社内データ

## 3M™ ESPE™ 圧排ペースト


複雑な圧排作業を楽にする圧排ペーストです。より確実な印象採得のためにご使用ください。

- 歯肉溝に挿入する先端部が細く、丸いため挿入し易い。
- 塗布後は水洗で洗浄可能 (ペーストは水溶性)。
- 歯肉圧排糸との併用も可能。
- 縁下でのマージン形成時、クラウンセット時等にも使用可能。

狭い歯肉溝へも楽にアクセス



レストラティブディスペンサーで  
ご使用ください。

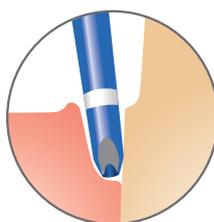

歯肉溝に挿入しやすい



原寸大



### 使用方法



レストラティブディスペンサーにセットして試し出しをします。



洗浄・乾燥した歯肉溝に製品先端の白いラインを目安に挿入します。



ペーストを注入します。



歯肉圧排糸との併用も可能です。



注入後2分おきます。




流水によりペーストを洗い流します。

# 口腔内での硬化時間のみを短縮

3M独自のセルフウォーミング機能（自己発熱機能）で、作業時間はしっかりキープしたまま、口腔内での硬化時間のみを短縮しました。（当社従来品比）


## 経過時間による硬化の比較

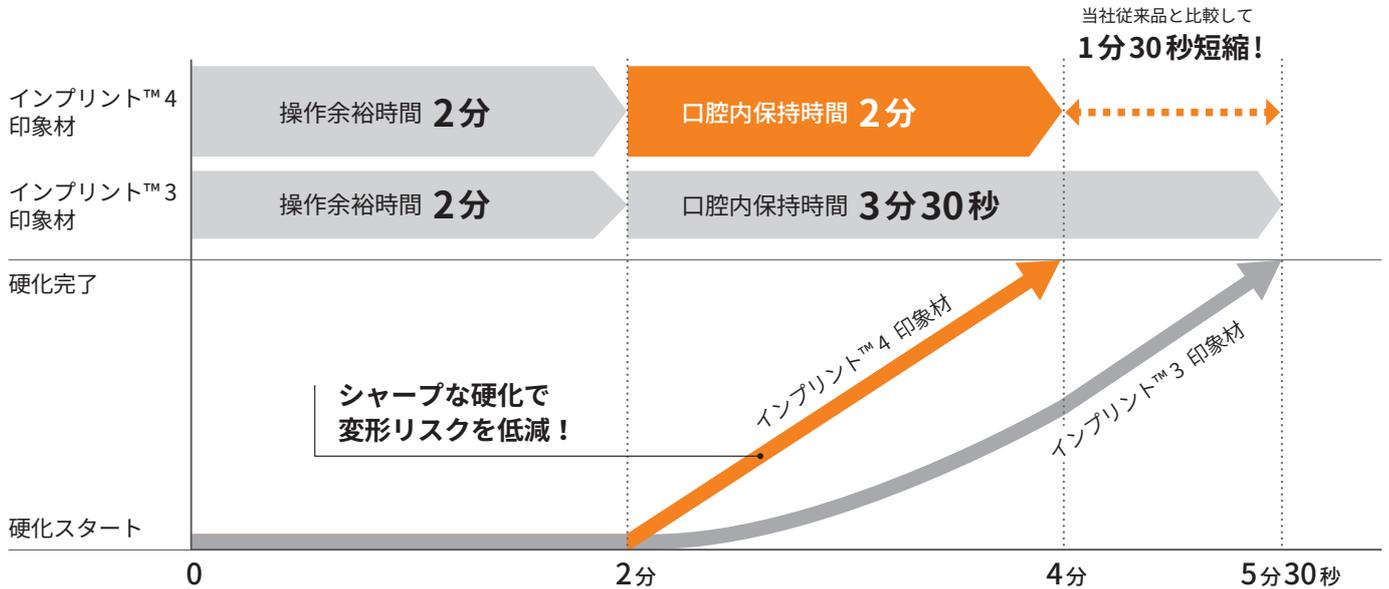

練和直後はすべての硬化剤が未反応



硬化剤（ビニルポリシロキサンとSi-Hポリシロキサン）が反応を開始

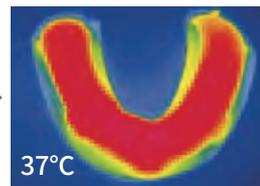

架橋剤と発熱成分の反応により、37°Cまで温度が上昇し、速やかに硬化が完了

3Mの独自技術セルフウォーミング機能（自己発熱機能）が、速やかな硬化を実現しました。

## ウォッシュ材の粘稠度比較

インプリント™ 4 印象材	ライト ボディ	レギュラー ボディ
インプリント™ 3 印象材	ライト ボディ	レギュラー ボディ
インプリント™ II 印象材	ライト ボディ	レギュラー ボディ
粘稠度	低	高

## 製品仕様



### ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

■ 50Hz 東日本用  
製品番号: 78000  
希望医院価格: 98,000円

■ 60Hz 西日本用  
製品番号: 77908  
希望医院価格: 98,000円

■ ペンタミックス™ ライト カートリッジ  
内容: 1個  
製品番号: 77944  
希望医院価格: 9,000円



### インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトトレー ボディ

内容: ベースペースト 300mL×2本  
キャタリストペースト 60mL×2本  
製品番号: 71550  
希望医院価格: 28,900円

■ ダブルパック  
内容: ベースペースト 300mL×4本  
キャタリストペースト 60mL×4本  
製品番号: 71550W  
希望医院価格: 50,100円



### インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ヘビー ボディ

内容: ベースペースト 300mL×2本  
キャタリストペースト 60mL×2本  
製品番号: 71484  
希望医院価格: 33,400円

■ ダブルパック  
内容: ベースペースト 300mL×4本  
キャタリストペースト 60mL×4本  
製品番号: 71484W  
希望医院価格: 57,900円



### インプリント™ 4 印象材 レギュラー ボディ

内容: 50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップイエロー×5本  
3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ×5本  
製品番号: 71557  
希望医院価格: 8,400円



### インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ

内容: 50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップイエロー×5本  
3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ×5本  
製品番号: 71558  
希望医院価格: 8,400円



### インプリント™ 4 印象材 ソフトトレー ボディ

内容: 50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップグリーン×5本  
製品番号: 71551  
希望医院価格: 8,100円

■ リフィルパック  
内容: 50mL×10本  
製品番号: 71556  
希望医院価格: 27,600円



### インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディ

内容: 50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップグリーン×5本  
製品番号: 71555  
希望医院価格: 8,700円

■ リフィルパック  
内容: 50mL×10本  
製品番号: 71531  
希望医院価格: 32,000円



### 3M™ ESPE™ 圧排ペースト スターターパック

内容: 3M™ ESPE™ 圧排ペースト  
トライアルパック (3個入) ×1パック  
レストラティブディスペンサー ×1個  
製品番号: 56940S  
希望医院価格: 8,200円



### 3M™ ESPE™ 圧排ペースト

■ トライアルパック  
内容: 3個  
製品番号: 56943  
希望医院価格: 1,500円

■ レギュラーパック  
内容: 25個  
製品番号: 56944  
希望医院価格: 11,800円

■ バリューパック  
内容: 100個  
製品番号: 56945  
希望医院価格: 45,000円

## 関連製品



### レストラティブ ディスペンサー

内容: 1個  
製品番号: 5850RD  
希望医院価格: 7,900円



### ペンタ™ ミキシングチップ レッド

内容: 50個  
製品番号: 77949  
希望医院価格: 6,100円

### トレー材用



### ギャラン™ ミキシングチップ グリーン

内容: 50本  
製品番号: 71450  
希望医院価格: 15,200円

### ウォッシュ材用



### ギャラン™ ミキシングチップ イエロー

内容: 50本  
製品番号: 71452 DEN  
希望医院価格: 15,200円



### ギャラン™ ミキシングチップ 口腔内注入チップ

内容: 50個  
製品番号: 71462  
希望医院価格: 4,800円



### 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ

内容: 20本  
製品番号: 71505  
希望医院価格: 5,300円

販売名: インプリント 4 印象材 認証番号: 225AKBZX00168000 / 販売名: インプリント 3 印象材 認証番号: 220AKBZX00165000 / 販売名: インプリント II 認証番号: 21500BZY00451000  
販売名: ペンタミックスライト 印象材自動練和器 届出番号: 13B1X10109000256 / 販売名: 3M ESPE 圧排ペースト 届出番号: 13B1X10109000253 / 販売名: ペンタ ミキシングチップレッド 届出番号: 13B1X10109000127  
販売名: ギャランミキシングチップ 届出番号: 13B1X10109000210 / 販売名: 3M ESPE イントラオーラル シリンジ 届出番号: 13B1X10109000254 / 販売名: レストラティブディスペンサー 届出番号: 13B1X10109000161

※掲載の内容および希望医院価格は、2022年7月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。  
3M、ESPE、インプリント、ペンタ、ペンタミックス、ギャランは、3M社またはその関連会社の商標です。

## スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2022. All Rights Reserved.  
DEN-1098-KJ(0722)PN/e.

Web 3M 歯科

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)