


**TEIJIN**

Human Chemistry, Human Solutions

吸収性歯科用骨再建インプラント材

# GR Tack Pin

吸収性タックピン

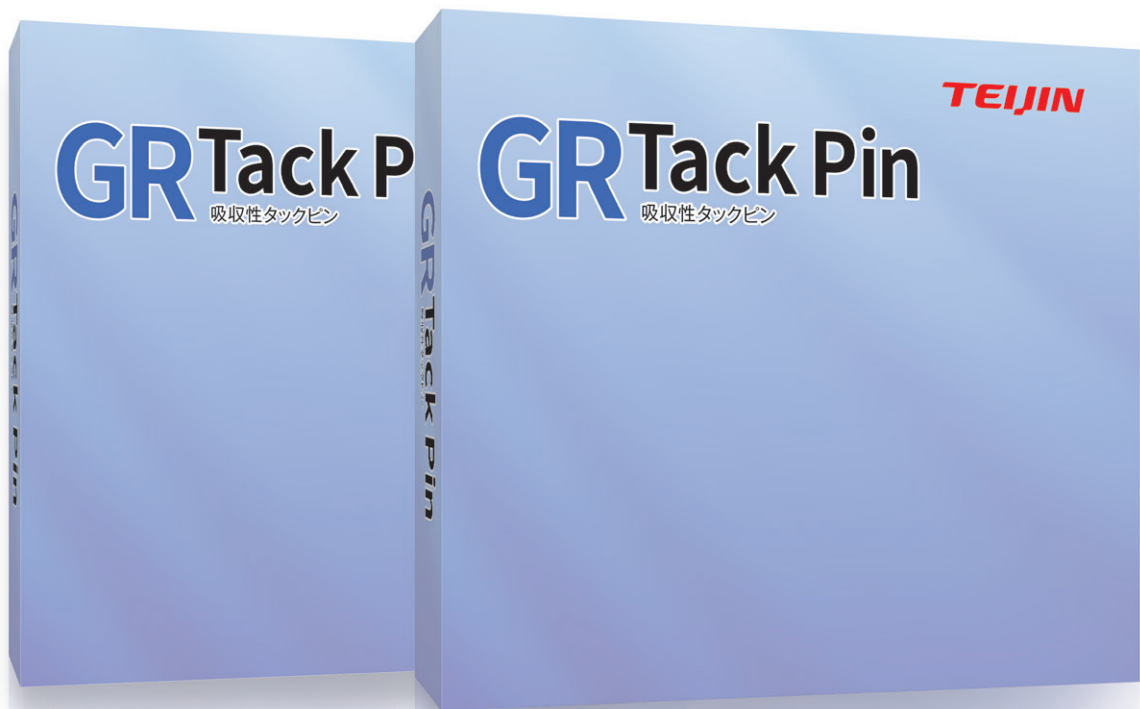

滅菌済

再滅菌禁止

再使用禁止

帝人メディカルテクノロジー株式会社  
TEIJIN MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.

# メンブレン固定の 吸収性材料

# GR Tack Pin

吸収性タックピン

## 組成


- L-乳酸グリコール酸共重合体(PLGA)共重合比率(LA/GA=88/12) 吸収性材料として臨床実績のある材料を採用
- 法定色素 紫色201号(着色剤、微量) 医薬品等に使用可能な色素として多くの埋込型医療機器で使用されている

## 特長

- 吸収性材料(分解吸収期間2-2.5年程度の設計)<sup>※1</sup>のため抜釘が不要
- Tack Pinは紫色に着色しているので視認が可能

## 使用方法

- 専用器械(別売)<sup>※2</sup>を用い骨孔を開け、挿入器で押し込んでTack Pinを骨孔に挿入

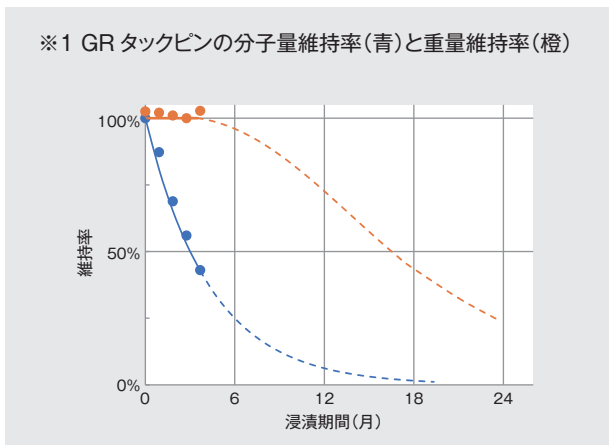

データ出典：社内試験データ  
試験条件：リン酸緩衝液(pH7.4) / 37℃に浸漬  
点線箇所：GR タックピンと同種のポリマーを用いた当社製品試験データからの推算

品番	外観	入数	標準価格
GRT1530-1	全長 3mm	1本	5,000円
GRT1530-2	 直径 1.5mm	2本	10,000円
GRT1530-4		4本	20,000円

「GRタックピン」、「GR Tack Pin」は帝人メディカルテクノロジー株式会社の商標です。

お取扱店



製造販売元

帝人メディカルテクノロジー株式会社

本社 / 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号(大阪三井物産ビル13F)  
東京営業所 / 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町二丁目31番地1(MTビル3F)


TEL: (06) 4706-2160  
TEL: (03) 6265-0223

帝人メディカルテクノロジー株式会社 ホームページ <https://teijin-medical.co.jp/> 右記のQRコードからもアクセスできます▶

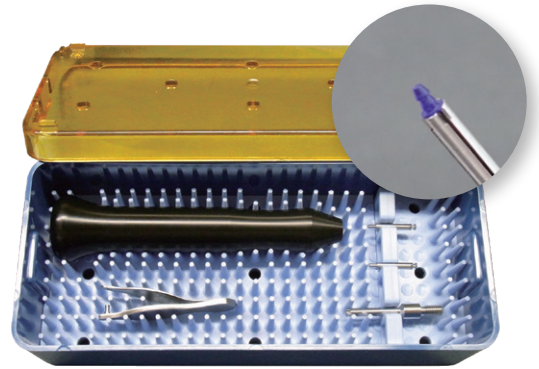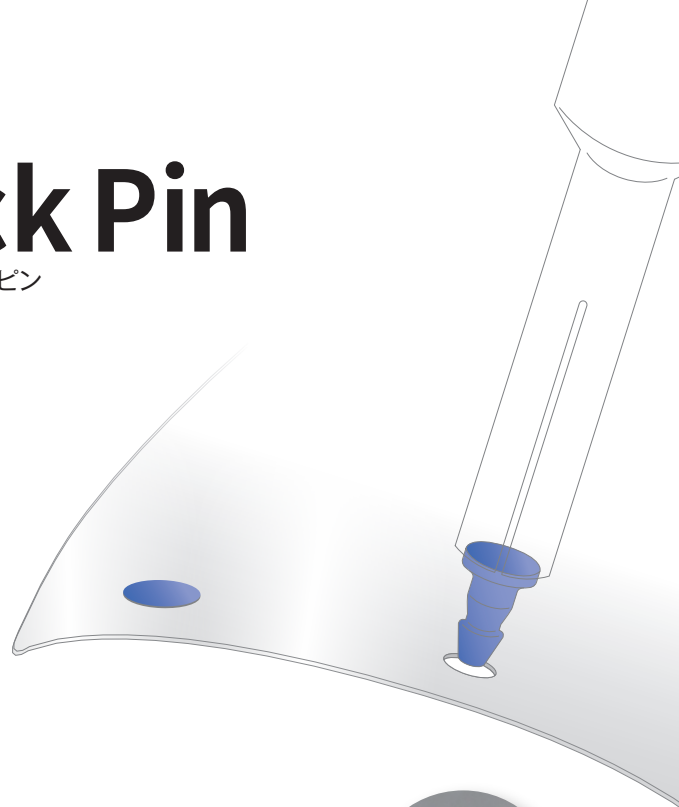

※2 GR タックピン専用器械  
販売名：GR タックピン スタンダード インストゥルメント  
製造届出番号：27B1X00155003002

**注意** 温度管理ラベルが赤くなった製品は使用しないこと

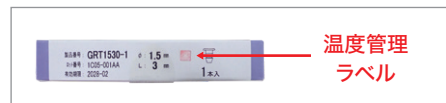

使用不可の目安

×印以外の**全面が完全に赤**になっている。  
(ピンクもしくは一部が赤の場合は使用可)  
×印がはっきりと見える。(元は薄く見える)

高度管理医療機器

一般的名称：吸収性歯科用骨再建インプラント材  
承認番号：30300BZX00228000  
販売名：GR タックピン

