


兼松式合釘(ポスト)抜去鉗子

本鉗子は継続歯の冠部が破折して、根面上に合釘(ポスト)が突出している場合に、これを引き抜くのに極めて便利な鉗子です。

特徴

1. 反動的ですから無痛です。
2. 時間がかからない。
3. 使用法が簡単です。

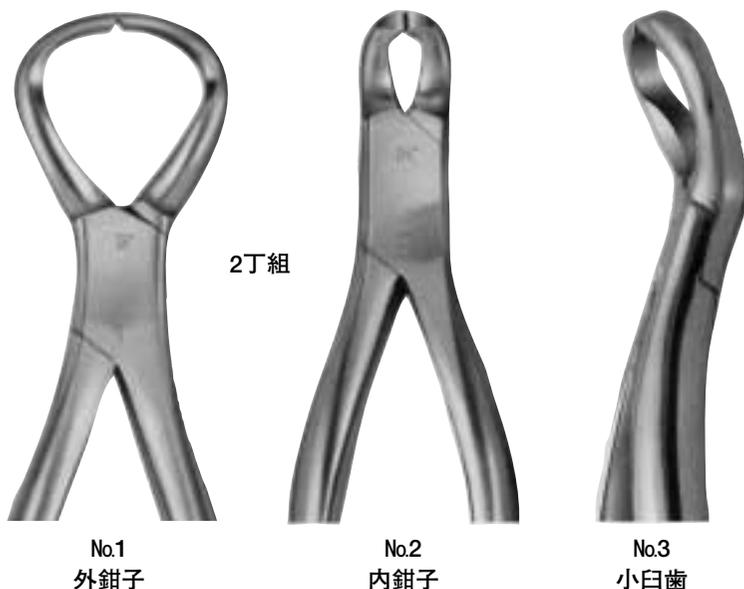

使用法


1. 歯冠部が破折してポストが根面上に残っている場合は、まず左手で2号鉗子を持ち、根面に嘴端を接触させてポストを把握する。次に1号鉗子を右手に持って、根面と2号鉗子の間に入れ、クサビの作用をさせて少し力を加えると、簡単にポストが除去できます。(図A)
2. 継続歯をそのままの状態で除去したい時は、1号鉗子を根面と歯冠との境界部に適合させ徐々に力を加えれば、殆ど歯冠部を傷つけずにそのまま除去することができます。(図B)
3. 根面板を有する場合は、根面板と根面との間に1号鉗子を入れて少し力を加えれば簡単に抜けます。
4. 根面を破折する心配のある場合は、根面と1号(外)鉗子との間に根面保護板を入れます。



根面保護板

根面の破折を防ぐ
5枚入 別売

図A

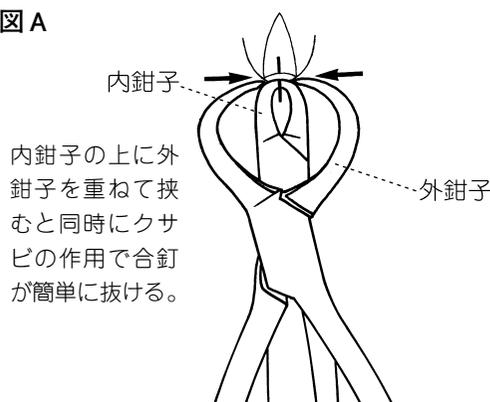

図B

