



DENTAL STONE [DUST FREE]

# TOP STONE DF TOP STONE DF FAST

トップストーンDF・トップストーンDFファスト

歯科用硬質石膏

印象模型のためのトップストーンDF。各種印象材に適合する、ダストフリータイプです。



ダストフリー

滑らかな  
模型面

3色

サンエス石膏株式会社

SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

# ドクターのご要望に応えるトップストーンDF。 各種印象材との適合性に優れた硬質石膏です。

## 特 長

- 1 新しいタイプのだストフリーですので、計量、練和時の粉末飛散がほとんどないのはもちろん、軽い練和感で練和することができます。

■粉末飛散性の比較（パイプを通し一定の風圧を加えました）




非だストフリー品

トップストーンDF

- 2 各種印象材との適合性が良く滑沢な印象面の模型が得られます。特に寒天印象材とは優れた適合性を発揮します。

■寒天印象材使用の硬質石膏表面

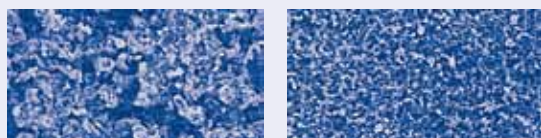

当社従来品

トップストーンDF

- 3 適度なチクソ性があり、練和、注入、盛り付け作業が容易に行えます。
- 4 硬化膨張・強度が安定していますので、常に高精度の模型が得られます。

## 用法・用量

- 1 粉末100gに対し、水23mlを標準とし、操作に支障のない限り水量を少なくすると、より強度、硬度の大きい模型が得られます。
- 2 練和時間は、真空機械練和で30秒、手練和で60秒が適切です。
- 3 印象への注入の際、パイプレーターなどを用いると、気泡のない模型が得られます。
- 4 注入後40分（ファスト20分）経過すれば、印象から模型を取り出すことができます。

## 物理的性質

試験項目 Test Items	測定値(注) Values determined	
	トップストーンDF TOP STONE DF	トップストーンDF ファスト TOP STONE DF FAST
混水比(水/粉) Water/Powder ratio (W/P)	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
硬化時間(分) Setting time (min)	<b>10</b>	<b>5</b>
線硬化膨張(%) Linear setting expansion <2hr>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
圧縮強さ<1時間後>(MPa) Compressive strength <1hr>	<b>50</b>	<b>50</b>

試験方法:JIS T6605による(タイプ2)

Test Method:Based on JIS T6605 (Type2)

(注)測定値は、弊社での代表的な値であり規格値ではありません。

## 用 途

- 1 インレー模型の製作用
- 2 クラウン模型の製作用
- 3 ブリッジ模型の製作用
- 4 部分床義歯模型の製作用
- 5 全部床義歯模型の製作用
- 6 矯正用模型の製作用

## 色 調

トップストーンDF イエロー、ブルー、グレー  
トップストーンDF ファスト イエロー

## 包 装

3kg箱(1.5kg アルミ×2)×6/PC



サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部

東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F  
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>  
E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

サンエス石膏

検索

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

トップストーンDF 一般医療機器 届出番号27B2X00022000003  
トップストーンDF ファスト 一般医療機器 届出番号27B2X00022000042  
製造販売元:サンエス石膏株式会社