

保険適用製品

マグフィット® M



特長

① マグフィットシリーズ唯一の保険適用製品


2021年にマグフィットシリーズで初めて保険適用製品になりました。

② 維持溝+オーバルウィングによる義歯固定


マグフィットMは、維持溝だけでなくマグフィットDXのオーバルウィングを併用し義歯からの脱落防止を図っています。

③ マグフィット初のダイレクトボンディング対応

ダイレクトボンディング対応のため、MRIにも対応します。

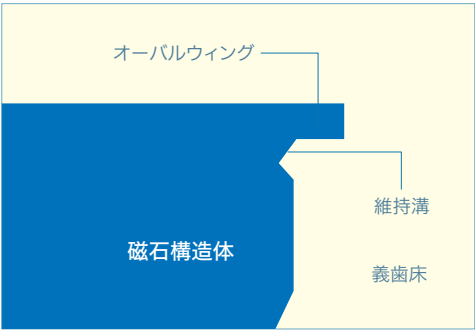

技エステップ（ダイレクトボンディング法）

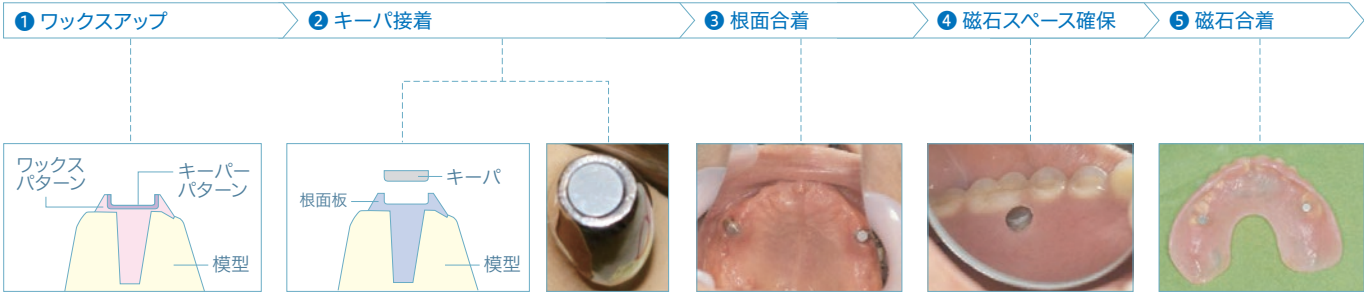

模型上でキーパーパターンの位置を決め、ワックスアップ作業を行う。※別売の「キーパーパターンM1」をご購入ください。

鑄造後に根面板を酸洗し、研磨仕上げなどを行い、キーパをレジンセメント等にて接着。

キーパを接着した状態。

支台歯へセメント合着。

磁石を位置決めした後、義歯を口腔内に装着し、磁石との間のスペースを確保。

磁石の合着は、義歯の調整が完了した1～2週間後に行う。




詳細な技工動画は、ホームページのマグフィット会員向け情報からご覧になれます。

仕様


基本性能				
製品名		M800	M600	M400
吸引力		800gf	600gf	400gf
磁石構造体の高さ(mm)		1.3	1.3	1.0
キーパ直径(mm)		Ø4.0	Ø3.6	Ø3.0
各部の寸法	磁石構造体(mm)			
	キーパ(mm)			

医療機器認証番号 マグフィットM：21200BZZ00089000

構造及び材質

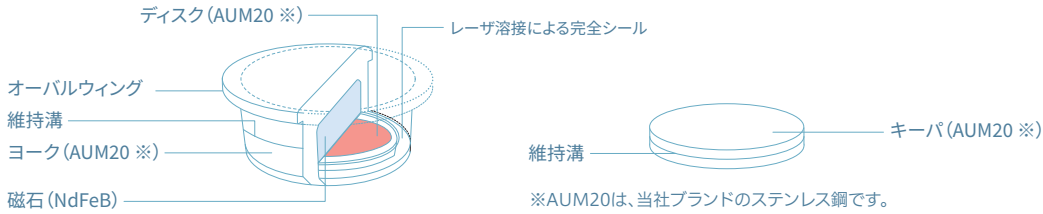

Mに必要な垂直距離(目安)

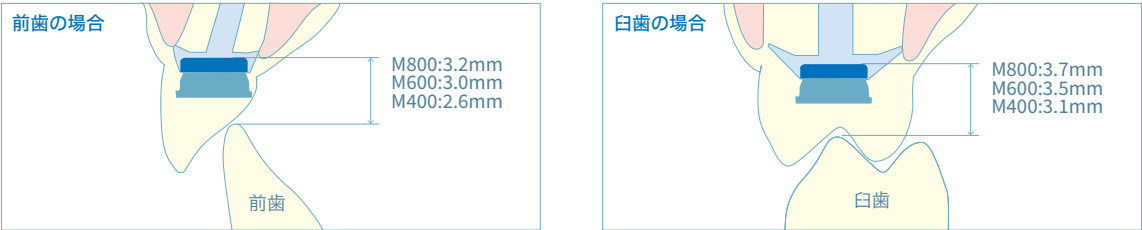

付属品

M400用 M600用 M800用

キーパーパターンM1
根面板にキーパを合着する際のスペースを作成するために用います。各品番には専用のキーパーパターンがあります。
※詳しい使用法は、マグフィット会の会員向け情報より技工動画をご覧ください。

診断用ゲージ
マグフィットのサイズゲージ。マグフィットM、DXの400、600、800に対応しています。対合歯との間に入れ根面板の高さや人工歯の厚みを事前に予測・チェックするために用います。

ダミー・フォーマ
磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。